

## **Inhalační kyslík**

Kyslík je určen k rychlé kyslíkové inhalaci, kterou lze provádět kdekoli. Díky víčku lahve, které současně plní funkci masky, lze aplikaci kyslíku provádět snadno a rychle, bez nutnosti použití dalšího příslušenství. Výrobek pomáhá udržet optimální okysličení organismu.

Je určen k profesionálnímu i domácímu použití. Pomáhá doplnit nedostatek kyslíku v organismu. Je určen osobám trpícím hypoxií, osobám se zvýšenou fyzickou a psychickou aktivitou.

### **Návod k použití:**

1. Sundejte z lahve víčko (slouží současně jako maska).
2. Víčko/masku namontujte na lahev uží stranou.
3. Přiložte masku na ústa a nos, následně stiskněte a přidržte tlačítko ca 1-2 sekundy. Po tuto dobu vdechujte uvolněný kyslík.
4. Po použití nasadte víčko/masku zpět na lahev.

### **Specifikace:**

Rozměry: 65 x 350 mm

Hmotnost: 175 g

Objem plynu: 12 L

Objem: 0,93 L

Tlak: 12 bar

Obsah: 99,4 % kyslík, 0,6 % atmosférický vzduch

1 balení vystačí přibližně na 120 vdechů

### **Bezpečnostní pokyny:**

1. Výrobek je určen k použití jedním uživatelem. Aby nedošlo ke křížové kontaminaci, nepůjčujte výrobek jiným osobám.
2. Za některých podmínek může být kyslíková terapie škodlivá. Před použitím se poradte s lékařem.
3. Nadměrné užívání vysoce čistého kyslíku má toxický vliv na lidský organismus a může způsobit nežádoucí vedlejší účinky.
4. Kyslík je druh plynu podporujícího hoření. Při používání výrobku je zakázáno kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm.
5. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
6. Nevystavujte teplotám nad 40 °C.
7. Nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití.
8. Nádobu pod tlakem. Při zahřívání může vybuchnout.
9. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Xi'an Arooxy Technology Co., Ltd.

Block E, the 5th Floor, R&D Bulding, ZTE industrial park,

10th Tangyan road, Xi'an city, Čína



Vet Planet Sp. z o.o.


Ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 ,łomianki ; Polsko

**Dovozce / Distributor:**

Helbo Sp. z o.o.

Ul. Tadeusza Śliwiaka 14A

30-797 Kraków / Polsko

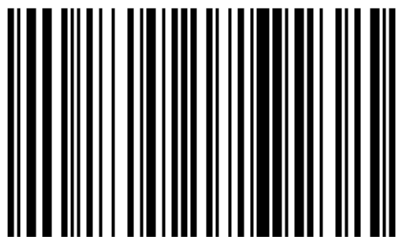

5906742631050



**LOT**

Zdravotnický prostředek

