



TERMOFOR OHRIVACI LAHEV 2 I

VYROBCE:
Helbo sp. z o.o.
Ul. Tadeusza Sliwiaka 14A
30-797 Kraków
www.helbo.pl



Použití: Ohřívací lahev DEPAN se používá k ohřívání těla. Může se jí používat v případě doporučené terapie teplem pro zmírnění, nebo odstranění svalové bolesti, uvolnění nebo zmírnění stresu. V případě pochybností konzultujte s lékařem.

Návod k použití: Naplňte lahev maximálně do 2/3 celkové kapacity, držte ji v příčné poloze. Vodu nalévejte tak, aby nedošlo k vytržení vody. Po naplnění vytlačte opatrně vzduch dokud se voda neobjeví v otvoru. Pak zatku pevně zasroubujte, aby nedošlo k vytékání. Po ukončení používání odsroubujte zatku a vylijte celou vodu. Po úplném vysušení nezasroubovavat zatku. Uchování: Ohřívací lahev uchovávejte otevřenou na teplém a suchém místě, zabrňte vystavení slunečnímu světlu. Neukládejte při skladování těžké předměty na ohřívací lahev – může to způsobit její poškození.

Připomínky:

1. Před každým použitím zkontrolujte, není-li ohřívací lahev poškozena a neteče.
2. Používejte ohřívací lahev v souladu s její účelou, podle návodu k použití.
3. Při plnění lahve nepoužívejte vroucí vodu – může to způsobit opáření.
4. Zamezte přímému kontaktu s pokožkou.
5. Neukládejte na ohřívací lahev těžké předměty, nesedějte na ni. Nepropíchnout. Nedezinfikujte. Nezasypíte olejem ani pevnými tuky. Chrňte ohřívací lahev před stykem s horkým povrchem.
6. Neohřívajte v mikrovlnce.
7. Plnění vodou z domácího systému horké vody může mít za následek značné zkrácení životnosti lahve.
8. Podle potřeby umyjte lahev mýdlem v teplé vodě.
9. Obsahuje přírodní gumu.
10. Nevyhazujte návod k použití.